

Hoe inhaleer ik met Turbuhaler®

Stap 1

Schroef de witte beschermkap los en haal deze van Turbuhaler af.



Stap 2

Houd Turbuhaler bij het witte gedeelte vast (niet bij het mondstuk). Draai de gekleurde draaigreep zo ver mogelijk naar de ene kant en draai daarna weer zo ver mogelijk terug naar de andere kant (het maakt niet uit naar welke kant u de eerste keer draait). U hoort dan een klik.



Stap 3

Adem eerst rustig uit (niet in het mondstuk).



Stap 4

Neem het mondstuk voorzichtig tussen uw tanden (niet bijten). Sluit de lippen en adem krachtig en diep in. U krijgt het geneesmiddel binnen, maar u voelt of proeft hierbij niets.



Stap 5

Neem Turbuhaler uit uw mond, houd uw adem enkele tellen vast en adem daarna rustig uit (dus niet door het mondstuk). Indien u nog een inhalatie moet nemen, herhaal dan de stappen 2 tot en met 5.



Stap 6

Schroef de witte beschermkap weer stevig op Turbuhaler. Zo blijft deze schok- en vochtbestendig.

